

د iHealth په کور کې د آزمویني لارښوونې د

February 7, 2022 3:02 PM PASHTO

مهمه ده چې له پیل څخه مخکې ورباندې پوه شئ



- له پیل مخکې ټولې لارښوونې په دقت سره ولولئ.
- داسې لارښوونې شتون لري چې ستاسو د آزمویني له کېت سره راځي. د نورو معلوماتو لپاره دا لارښوونې وگورئ.
- که تاسو مرستې ته اړتیا لرئ، د خپلې ټولني روغتيايي کارمند ته زنگ ووهئ.
- کله چې دا آزموینه په سمه توګه وکارول شي نو درد به ونکړي.
- ستاسو آزموینه یوازې یو ځل ترسره کېدی شي. آزموینه بیاځلي مه کاروئ.
- د سواب څوکه یا د کارت د مخ طرف په خپلو لاسونو سره مه لمس کوئ.
- له آزمویني **مخکې** او **وروسته** لاسونه په بشپړ ډول ومینځئ.

1. مواد چمتو کړئ

- کڅوړه خلاصه کړئ او

« له کڅوړې څخه د آزمویني کارت او

« د مایع څخه ډک ټیوب (د استخراج ډال) را وباسئ

« سواب په خپل پوښ کې دی

- تر هغه چې اړتیا وي ټول توکي په خپلو پوښونو کې پریږدئ.

- کله چې تاسو چمتو یاست، د آزمویني کارت له کڅوړې څخه را وباسئ. په یو هوار میز یا ګاونډر باندې یې خپلې مخې ته کېږدئ.

2. نمونه راواخلئ

- سواب له خپل پوښ څخه را وباسئ. **پام مو وي چې څوکه لمس نکړئ.** پوښ مه غورځوئ.

- سواب په یوه سېرمه کې دننه کړئ. ژور یې مه دننه کوئ، یوازې (1.5 سانتي متره) تر (2 سانتي متره) یې دننه کړئ.

- سواب ته د خپلې سېرمې د ننه شاوخوا فشار ورکړئ. سواب د خپلې سېرمې د ننه شاوخوا په آرامۍ سره په دوراني شکل وموښئ.

« د خپلې پوزې دننه شاوخوا 5 یا ډیرې ورو حلقې جوړې کړئ.

« دا باید لږ تر لږه 15 ثانیې وخت ونیسي.

- ډاډ حاصل کړئ چې سواب د خپلې سېرمې د ننه شاوخوا په ټولو اړخونو کې په کلکه سره وموښئ.

- له ورته سواب څخه په استفادې سره دغه ټول ګامونه په خپله بله سېرمه کې تکرار کړئ.




د ډک ډروڅک ډیپ وی ټی وی و مزاد 19-ډی و وک تراک



ټیوب وی



سواب وی

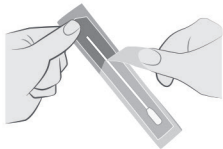

رت چنای هوی د یروپ ی ص ح 4/3



ورو ډیپ 5x ی ی شرب ټی ټک



ورو ډیپ 5x ی ی شرب ټی ټک

3. د پروسي پیلگه



• ټیوب نیغ ونیسئ. په میز باندي د ټیوب لاندينی برخي ته 2 څخه تر 3 ځلي ټپ ورکړئ.

• د بوتل خلاصولو لپاره ستر، نارنجي سرپوښ تاو کړئ. پام مو وي چې هېڅ مایع د باندي توی نشي.

• د خپلي نموني سره د سواب څوکه ټیوب ته دننه کړئ **تر هغې چې د ټیوب په بشکننی برخه باندي ولگيږي.**



• لږ تر لږه **15 ځله** سواب د ټیوب په مایع کې وښورئ.

• کله چې تاسو سواب له ټیوب څخه وباسئ نو د ټیوب اړخونو ته په سواب باندي فشار ورکړئ. دا باید د دې لامل شي چې یو څه مایع د سواب له څوکي څخه وباسي. سواب بیرته کولای شئ پخپله اصلي کڅوړه کې واچوئ او وپي غورځوئ.

• نارنجي پوښ بیرته په بوتل باندي ولگوئ.

4. نمونه اضافه کړئ او انتظار وکړئ

• ټیوب باندي کوچنی سپین سرپوښ تر هغه وخت پورې تاو کړئ تر څو چې خلاص شي.

• ټیوب تاو کړئ او د نموني **3 څاڅکي** د آزمويي د خپل کارت په **کوچني سوري** کې واچوئ.

• کوچنی سپین سر پوښ بیرته په ټیوب باندي کېږدئ. ټیوب له سواب سره بشکته واچوئ ترڅو ليري وغورځول شي.

• کارت د 15 دقیقو لپاره پر خپل ځای باندي کېږدئ. لمس کوئ او خوځوئ يي مه.



5. پایلي ولولئ

• د 15 دقیقو انتظار وروسته، تاسو کولی شئ د خپلي آزمويي پایله ولولئ. تاسو باید خپله پایله وروسته له دې چې کارت ته څاڅکي اضافه کړئ د **15 دقیقو او 30 دقیقو تر منځ ولولئ**. خپله پایله مه ولولئ وروسته له دې چې 30 دقیقې تیرې شي.

• ستاسو د آزمويي پایله **مثبته** ده که تاسو دوه کرښي وگورئ، یوه د "C" لاندي او بله د "T" لاندي.

« **ډېر له نږدې ورته وگورئ!** د "T" لاندي کرښه کېدای شي ډیر **کمزوری وي**. هره کرښه چې تاسو يي د "T" لاندي لیدلئ شئ پدې معنی چې ستاسو آزمويه مثبت ده.

« د مثبتو آزمويو د حقيقي انځورونو لپاره هغه لارښوونې وگورئ چې ستاسو له آزمويي سره راځي.

• که تاسو یوازې یوه کرښه وگورئ (دا به د "C" لاندي وي)، ستاسو د آزمويي پایله **منفي** ده.

• که تاسو له دې مواردو څخه کوم یو وگورئ، آزمويي **کار نه دی کړی**:

« هېڅ کرښه نشته

« یوازې د "T" لاندي یوه کرښه

• که ستاسو آزمويي کار ورنکړ، بله آزمويه وکړئ یا د خپلي ټولني روغتیايي کارکوونکي ته زنگ ووهئ.

مور دغه لارښوونې آسانه کړي دي. د بشپړو لارښوونو لپاره هغه لارښوونې وگورئ چې ستاسو د آزمويي له کېټ سره راغلي دي. که تاسو پوښتنې لرئ مهرباني وکړئ د طبي متخصص سره مشوره وکړئ.

راتلونکي اقدامات

• د آزمويي له مثبتې یا منفي پایلي سره څه وکړو لنده لیکنه ولولئ.

• خپل د آزمويي کېټ لري وغورځوئ.

• خپل لاسونه ومینځئ.