

iHealth 在家測試說明書

March 17, 2022 10:48 AM TRAD CHINESE


在開始使用 之前了解重要信息

- 開始使用前仔細閱讀所有說明。
- 您的測試盒也附有說明書。查看這些說明以獲取更多信息。
- 如果您需要幫助，請致電您的社區衛生部工作人員。
- 如果使用得當，這個測試應該不會造成傷害。
- 一個測試盒只能使用一次。不要重複使用。
- 請勿用手觸摸棉籤尖端或卡片正面。
- 測試**前後**徹底洗手。



1. 準備材料

- 打開包裝並取出
 - » 測試卡在小袋中
 - » 試管充滿液體（濃縮緩衝液）
 - » 棉籤包在裝包中
- 將所有物品留在包裝中，直到需要才拿出來。
- 準備好後，從袋中取出測試卡。將它放在您面前的平坦桌子或檯面上。

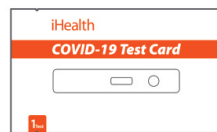

一張 COVID-19 測試卡





一根試管




一根棉籤

2. 採集樣本

- 從包裝中取出棉籤。**小心不要觸摸尖端**。不要扔掉包裝紙。
- 將棉籤放在一個鼻孔中。不要插入太深，僅插入1/2英寸（1.5公分）到3/4英寸（2公分）。
- 將棉籤按在鼻孔內側。慢慢地將棉籤繞著鼻孔內擦一圈。
 - » 在鼻孔內側慢慢轉繞至少**5圈以上**。
 - » 這動作至少需要 **15 秒**。
 - » 轉繞時棉籤必須要牢牢擦鼻孔內側，全繞一圈。
- 使用相同棉籤並在另一個鼻孔中重複所有這些步驟。

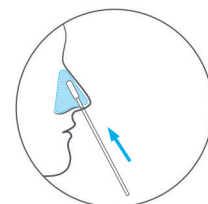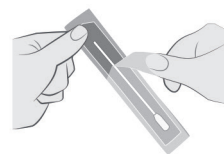

到3/4英寸

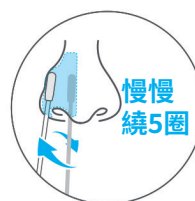



慢慢
繞5圈



慢慢
繞5圈

3. 採樣過程

- 保持管子直立。在桌子上輕敲試管底部2至3次。
- 擰開橙色大蓋子以打開管子。小心不要濺出任何液體。
- 將剛擦拭鼻孔的棉籤插入試管中，**直至接觸到試管底部**。
- 將棉籤在試管中的液體中攪拌至少**15次**。
- 要把棉籤從試管中拉出時，將試管的兩側擠壓棉籤。這會將一些液體從棉籤尖端擠出。然後把棉籤放回原來的包裝中，就可把有棉籤的包裝扔掉。
- 將橙色蓋子放回管上關緊。

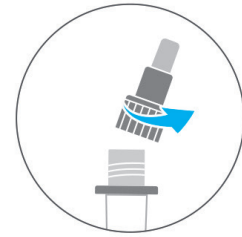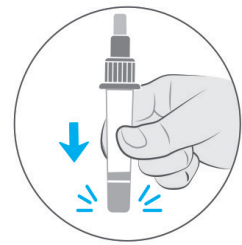


4. 加樣本並等待

- 轉動試管上白色小蓋子，直到它脫落。
- 將試管翻轉過來，擠**3滴**樣本到測試卡上較小的孔中。
- 將白色的小蓋放回試管上。與棉籤包裝，一起扔掉。
- 讓卡片靜置15分鐘。不要觸摸或移動它。



5. 讀取結果

- 等待15分鐘後，您就可以閱讀您的測試結果。滴劑添加到卡片後，您必須在**15到30分鐘之間**，閱讀您的結果。務必不要**過30分鐘後**才閱讀結果。
- 如果您看到兩條線，一條在“C”下方，一條在“T”下方，則您的測試結果為**陽性**。
 - » **仔細看!**“T”下方的線可能非常**微弱**。在“T”下看到的任何線條都表示您的測試是陽性的。
 - » 請參閱測試隨附的說明，以視陽性測試的實際照片。
- 如果您只看到一條線（在“C”下方），那您的測試結果則為**陰性**。
- 如果您看到以下任何一種情況，則測試是**無效**：
 - » 沒有線
 - » 只有“T”下方有線
- 如果您的測試無效，請進行另一次測試或致電您的社區衛生部工作人員。

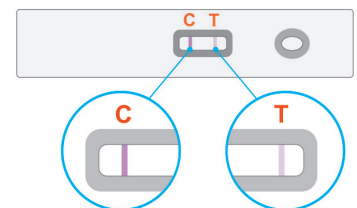

下一步

- 閱讀講義“如何處理陽性或陰性測試結果”
- 扔掉您的測試套件。
- 洗淨你的手。

本說明書已簡化。請查看測試套件盒隨附的說明書，以獲取完整說明。如果您有任何疑問，請諮詢醫療專業人員。